

Obesimed® Max Forte

- Zmanjša vnos kalorij iz sladkorjev, ogljikovih hidratov in maščob
- Zmanjša apetit
- Za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti

Splošni nasveti: Pred jemanjem medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte natančno preberite navodila za uporabo, tudi če ste ta medicinski pripomoček že jemali. Informacije so bile morda posodobljene, preden ste začeli z novim paketom, tako da zdaj odražajo najnovejša spoznanja in podatke. Ta medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Kljub temu morate Obesimed® Max Forte uporabljati previdno, da dosežete dobre rezultate. Ta navodila shranite, saj jih boste morda morali ponovno prebrati.

Uporaba: Obesimed® Max Forte je medicinski pripomoček, ki se uporablja za zdravljenje in preprečevanje prekomerne telesne mase in debelosti ter je primeren za odrasle od 18. leta starosti.

Odmerjanje in uporaba za odrasle od 18. leta starosti: 3-krat na dan po 2 tableti, zaužijte jih eno uro pred obrokom z velikim kozarcem vode (250 ml). Med jemanjem medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte vsak dan zaužijte en multivitaminsko-mineralni pripravek. Obesimed® Max Forte znižuje raven nekaterih vitaminov in mineralov, ki jih telo sicer absorbira. Priporočljivo je, da vitaminsko-mineralni dodatek zaužijete pred spanjem, tako da bo vaše telo vsekakor absorbiralo vitamine in minerale.

Trajanje uporabe: Ne uporabljajte več kot 30 dni v enem obdobju zdravljenja. Zdravljenje se nato lahko nadaljuje po 4 dneh.

Delovanje: To je medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti. Omtex XS® iz hrane odstrani sladkorje, ogljikove hidrate in maščobe ter poskrbi, da te snovi nato zapustijo telo, namesto da bi končale v presnovi. Hkrati Omtex 50® povzroči, da tableta v želodcu tvori gelni matriks. To ustvarja občutek sitosti in zmanjša lakoto, zato je mogoče brez težav zmanjšati velikost obroka. Znanstveno dokazana učinkovitost.

Možni stranski učinki: Obesimed® Max Forte lahko kmalu po zaužitju daje občutek sitosti. Ta pogosto hitro izgine. Pri osebah z občutljivim želodcem ali črevesjem se lahko pojavijo bolečine v trebuhu, slabost, razdražen želodec, prebavne motnje, plini ali zaprtje. Če neželeni učinki vztrajajo, je priporočljiva prekinitev zdravljenja.

Medsebojno delovanje: Visoka sposobnost vezave maščob medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte lahko vpliva na absorpcijo vitaminov, topnih v maščobi in učinkovin zdravil. To velja na primer za hormone v kontracepcijskih tabletah ali v pripravkih, ki se uporabljajo za zdravljenje motenj menopavze. Morebitna druga peroralna zdravila je treba uporabiti 1 uro pred jemanjem medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte ali 4 ure po njem.

Omejitve uporabe:

- pred dolgotrajno uporabo se posvetujte z zdravnikom;
- ne jemljite zdravil, vitaminov ali esencialnih maščobnih kislin hkrati z medicinskim pripomočkom Obesimed® Max Forte;
- morebitna druga peroralna zdravila je treba zaužiti 1 uro pred jemanjem medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte ali 4 ure po njem. Če morate med glavnim obrokom jemati kakšna zdravila, se pred začetkom jemanja medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte posvetujte z zdravnikom;
- v primeru zaprtja ali drugih stranskih učinkov morate z uporabo takoj prenehati in se posvetovati z zdravnikom.

Kontraindikacije:

Ne jemljite medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte, če:

- ste preobčutljivi ali alergični na katero koli sestavino;
- imate ali ste imeli bolezen prebavil (npr. kislini refluks, gastritis, ventrikularne razjede ali razjede dvanajstnika, Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, divertikulitis), znake črevesne obstrukcije (grozeče oz. obstoječe mehanske obstrukcije ali paralični ileus), gastroparezo kot diabetik z nevropatijo, črevesne polipe ali obstoječe hude prebavne motnje (zaprtje);
- jemljate varfarin (zdravilo za redčenje krvi) ali druga zdravila za redčenje krvi;
- imate prenizko telesno maso (indeks telesne mase (ITM) < 18,5);
- ste noseči ali dojite;
- ni primerno za dojenčke ali majhne otroke;
- starejši otroci in mladostniki lahko Obesimed® Max Forte uporabljajo samo po posvetu z zdravnikom.

Uporaba med nosečnostjo in/ali dojenjem: Jemanje medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte med nosečnostjo in/ali dojenjem ni priporočljivo.



Opozorila:

- tablet ne žvečite ali grizite;
- hranite zunaj dosega otrok;
- ne uporabljajte, če je pretisni omot tablet poškodovan.

Sestava: Omtex XS® beli fižol, mikrokristalinična celuloza, Omtex 50®, hitozan, hidroksiipropil celuloza, magnezijev stearat. Izdelek je primeren za vegane in vegetarijance.

Vsebina: 30 tablet



Način shranjevanja: Hranite pri temperaturi med 5 in 25 °C v suhem in temnem prostoru, v originalni embalaži, nedosegljivo otrokom.



Rok uporabnosti: Ne jemljite medicinskega pripomočka Obesimed® Max Forte po datumu na dnu škatlice.

Medicinski pripomoček: Obesimed® Max Forte je medicinski pripomoček razreda IIa skladno z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS.

Datum zadnje spremembe teh navodil:

junij 2020 – 073606-V1.2



Proizvajalec:
PK Benelux BV,
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL

Distributer za Slovenijo:

DIFAR d.o.o.,
Pernetova ulica 1, 1236 Trzin, 01-564-11-95
www.difar.si