

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnike. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najbolj koristil, ga uporabljajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

Cicatridina®

NATRIJEVA SOL HIALURONSKE KISLINE, 5 mg
vaginalne ovule

SESTAVA

Natrijeva sol hialuronske kisline, azijski vodni popnjak, ognjič, aloje vera, čajevec, polsintetični gliceridi, BHT.

V KAKŠNI OBLIKI JE

CICATRIDINA je ovula za vaginalno uporabo. V škatli je 10 vaginalnih ovul po 2 g.

KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

CICATRIDINA vaginalne ovule učinkujejo zaradi vsebnosti hialuronske kisline. To je mukopolisaharid, ki je v večjih količinah prisoten v mnogih telesnih tkivih. Hialuronska kislina pripomore k izgrajevanju tkiv tako, da jim povrne čvrstost, prožnost in elastičnost. Številne klinične študije so pokazale, da hialuronska kislina lahko pospeši in izboljša obnovo povrhnjice in celjenje tkiva.

INDIKACIJE

Dodatna pomoč pri obnavljanju vaginalne sluznice v primeru atrofičnih in distrofičnih stanj. Pospešuje celjenje ran po porodu, v ginekološki kirurgiji, pomaga pri distrofijah zaradi kemoterapije ali ionizacijskega sevanja ter pri suhosti nožnice, tudi zaradi pomanjkanja estrogena.

KDAJ JE NE SMETE UPORABLJATI

Ne uporabljajte v primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka.

Nosečnost in dojenje

V teh primerih je potreben posvet z zdravnikom.

Vpliv na upravljanje vozil in strojev


Posebni varnostni ukrepi niso potrebni.

MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI

Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite CICATRIDINA vaginalne ovule v kombinaciji z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili za vaginalno uporabo.

KAKO SE MORA UPORABLJATI

Odstranite ovulo tako, da razmaknete in potegnete narazen oba konca folije na vrhu ovoja in jo vstavite globoko v nožnico. Umijte si roke pred uporabo medicinskega pripomočka in po njej.

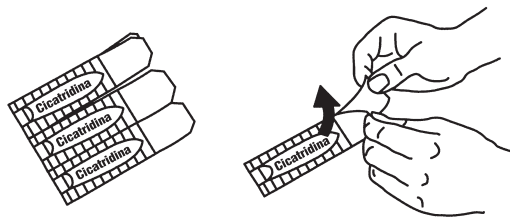

KDAJ IN KAKO DOLGO

Uporabite eno ovulo na dan, po možnosti zvečer pred spanjem, ali po navodilu zdravnika. Trajanje uporabe je odvisno od razvoja simptomov; če je potrebno, so CICATRIDINA vaginalne ovule primerne tudi za dolgotrajno uporabo.

NEŽELENI UČINKI

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezni terapiji. Če se pojavijo drugi neželeni učinki, o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

OPOZORILA

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

ROK UPORABE, SHRANJEVANJE IN ODSTRANJEVANJE

Rok uporabe se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte zaščiten pred svetlobo in toploto, najbolje pri temperaturi od 4° do 25°C. Medicinskih pripomočkov naj ne bi odvrgli v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke; o načinu odstranjevanja medicinskih pripomočkov, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte s svojim farmacevtom. To bo pripomoglo k zaščiti okolja.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK C € 0373



Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l.

Via dell'Artigiano 6-8 – 40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIJA (ITALY)

Uvoznik: DR. GORKIČ d.o.o.

Obrtniška ul. 11, 1370 Logatec, SLOVENIJA