

Akutol Burn Spray

Akutol sprej namenjen za manjše površinske opekline I. in II. stopnje, ter sončnih opeklin. Preprečuje izsuševanje, omogoča dihanje rane in celi. Ni namenjen za hude opekline II.b in III. stopnje! Za vse starostne skupine, za otroke od 3. leta starosti naprej ter za diabetike. Nanesemo ga na površino opečenega mesta in ponovimo vsaj 2-krat dnevno, da je opečeno mesto ves čas prekrito. Če se razpršilec dotakne poškodovanega območja, ga sperite s tekočo toplo vodo in ga po sušenju zaprite s pokrovom. Ne uporabljajte, če ste alergični na katero od sestavin izdelka. Za uporabo spreja pri nosečnicah in med dojenjem se posvetujte z zdravnikom. Opozorilo: zaščitite oči in ne vdihavajte razpršila. Pri visoki temperaturi se lahko razpoči, ne izpostavljajte nad 50 °C. Zaščitite pred vročino, vročimi površinami, iskrami, odprtim ognjem in drugimi virom vžiga. Ne prebadajte ali ne žgite niti po uporabi. Shranjujte izven dosega otrok. Embalažo odstranite v zbiralniku za nevarne odpadke. Rok uporabnosti: Porabiti do datuma, navedenega na dnu. Sestavine: Voda, natrijev hialuronat, propilen glikol, izvleček cveta ognjiča, karbomer, izvleček aloe vere, fenoksietanol, etilheksilgliceril, natrijev hidroksid. Ne vsebuje zdravilnih snovi, bioloških materialov, krvnih derivatov. Proizvajalec: AVEFLOR, d.o.o., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Češka, Uvoznik in distributer: AstraVita d.o.o., LJUBLJANA, www.astra-vita.eu, info@astra-vita.eu. Datum izdaje: 1.11.2023