

CREDO Diabetics DuoSoft pila za trdo kožo z menjajočimi se brusilnimi folijami

Za odstranjevanje prekomerno poroženele kože – površino kože pili nežno mehko – uporablja se lahko za suho piljenje in mokro piljenje pod tušem - vodoodporna - priloženi sta dve različno grobi brusilni površini (groba in fina), ki jih je kasneje moč dokupiti.

Navodila za uporabo: **Korak 1:** Odstranite zaščito, ki je ob nakupu nameščena na pili na mestu kamor kasneje namestite brusilne folije. **Korak 2:** Na eno stran pile namestite grobo brusilno folijo, na drugo stran pa fino brusilno folijo. **Korak 3:** Mesta, ki jih želite obdelati najprej popilite z grobo stranjo in nato zgladite s fino stranjo. Pri piljenju delajte gibe naprej in nazaj. **Korak 4:** Po uporabi sperite pod tekočo vodo. **Korak 5:** Po večkratni uporabi posamezno nalepljeno brusilno folijo odlepите in jo zamenjajte z novo. **Ko lepите posamezno brusilno folijo mora biti pila suha.** **OPOZORILA:** DuoSoft pile ne uporabljajte na ranah in mestih, ki se hitro razdražijo. Diabetiki in posamezniki z motnjami krvnega obtoka se morajo pred prvo uporabo o pravilni uporabi posvetovati s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Držalo pile je iz trajnostne, biološke mase. **Shranjujte izven dosega otrok.**

Zastopnik za Slovenijo: KANA, d.o.o., Žalec, Tel.: 03/ 713 18 00

www.credo-solingen.si

1 kom, št. art. 80 03 837