

SOLLIEVO

PhysioLax

Fiziološko lajšanje težav z

ZAPRTJEM

MEDICINSKI PRIPOMOČEK NA OSNOVI SNOVI
z nefarmakološkim delovanjem



100%
NARAVNA IN
BIORAZGRADLJIVA
FORMULA



MEDICINSKI PRIPOMOČEK razreda IIa

TABLETE

SL Sollievo PhysioLax je medicinski pripomoček, ki je popolnoma naraven in zasnovan za lajšanje težav z zaprtjem. Izdelek deluje na osnovi več naravnih snovi. Te vplivajo na številne funkcije, s katerimi črevesje običajno uravnava prehajanje vsebine. Sollievo PhysioLax tako učinkuje z mehanizmom delovanja, ki ni farmakološki, temveč fiziološki.

Ta fiziološki mehanizem delovanja je rezultat naših študij molekularne in celične biologije, ki so bile podprte z bioinformatičsko obdelavo podatkov.

Izdelek Sollievo PhysioLax je pridobljen po popolnoma naravnih postopkih, brez uporabe topil ali drugih sintetičnih snovi.

SESTAVA IN LASTNOSTI

- Kompleks Sollievo PhysioLax** (na osnovi sene, navadnega potrošnika, koromača, regrata, navadne kumine in kumina), **420 mg/tableta**
- Sollievo PhysioLax se preverja z naslednjima parametroma:

Metaboloski digitalni odtis – pridobljen s tehnologijo bližnje infrardeče spektroskopije (NIR) – potrjuje standardizirano sestavo naravnega izdelka

SKLADNOST

Preizkus adhezije

za potrditev učinka pregrade in zaščitnega delovanja na celice črevesja

SKLADNOST

Polifenolni kompleks s flavonoidi in senozidi $\geq 3,1\%$

NAČIN UPORABE: priporoča se, da zvečer po potrebi vzamete od 1 do 3 tablete, ki jih zaužijete skupaj s polnim kozarcem vode. Ustrezen odmerek je najmanjši, ki zadošča za spodbujanje fiziološkega prehajanja vsebine skozi črevesje, ne da bi pri tem nastajalo tekoče blato. Odmerek je zato mogoče prilagoditi potrebam posameznika. Izdelek je primeren za uporabo od 12. leta naprej.

Za spodbujanje prehajanja blata skozi črevesje se na splošno priporoča uživanje tekočine preko dneva, vnos ustrezne količine vlaknin in ukvarjanje s telesno dejavnostjo.

OPOZORILA: ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več sestavin. Ne prekoračite največjega priporočenega odmerka. Hranite izven doseg a otrok. V primeru dolgotrajnega zaprtja se morate posvetovati z zdravnikom. Hranite pri sobni temperaturi ter v hladnem in suhem prostoru, stran od virov svetlobe.

Datum zadnje posodobitve navodila: 01/2021



ZA DANAŠNJE IN JUTRIŠNJE ZDRAVJE

Aboca je družba z odgovornim poslovanjem, ki je pridobila certifikat B Corporation.

Zavezali smo se k poslovanju, ki je odgovorno, trajnostno in pregledno z vidika skupnosti in okolja. Poročilo o vplivu je dostopno na spletnem mestu www.aboca.com.

Popolnoma naravno in biorazgradljivo Sollievo PhysioLax ne vsebuje snovi, pridobljenih s sintezo in polsintezo, ter gensko spremenjenih organizmov.



Vsebuje 27 tablet
po 420 mg

Vsebuje 45 tablet
po 420 mg



MATERIAL EMBALAŽE

Za informacije o odlaganju preverite lokalne predpise.

Škatla PAP 21 > Papir

Navodilo za uporabo PAP 22 > Papir

Steklenička GL 72 > Steklo

Pokrovček C/ALU 90 > Pretežno aluminij

Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Podjetje s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 13485 ter sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.



HRLEALASSA2-A