

Naziv artikla: MACK'S PILLOW SOFT SILICONE EARPLUGS (2 para)

Namembnost: zmanjševanje hrupa, plavanje, tuširanje, zaščita, miren spanec.

Navodila za uporabo: Roke in vhod v uho morajo biti čisti in suhi. Cel čepek zgnite v kroglico. Namestite ga čez vhod v sluhovod in ga s prstom sploščite, da dobro tesni. Lasje ne smejo biti med čepkom in kožo. Čepka ne vstavlajte v sluhovod.

Opozorila: Uporabljajte samo cel čepek. Ne režite, ne trgajte in ne raztezajte. Otroci, mlajši od 15 let, smejo izdelek uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Ne uporabljajte pri potapljanju ali na globinah nad 3 m. Umazane ali nelepljive čepke zavrzite. Čepke zavrzite tudi po stiku z mazivi, topili ali drugimi kemikalijami. Hranite nedosegljivo dojenčkom in majhnim otrokom zaradi nevarnosti zadužitve.

Oznaka standarda: EN 352-2:2020

EU DoC: www.macksearplugs.com/certs/

Proizvajalec: McKeon Products, Inc.

Uvoznik: ORGANIKA, d.o.o.

Leto uvoza: 2025

Poreklo artikla: ZDA