

Informácie pre bezpečné používanie

CERUSTOP ušný olej v spreji je zdravotnícka pomôcka. V prípade bolesti uší alebo ak je váš zvukovod silne upchatý mazovou zátkou, musíte bezpodmienečne vyhľadať lekársku pomoc! V prípade už existujúceho poškodenia bubienka/stredného ucha sa pred použitím CERUSTOP ušný olej v spreji poraďte so svojim lekárom.
Do zvukovodu nezasúvajte žiadne cudzie telesá (napr. vatové tyčinky)!

Fľaštičku vždy uchovávejte uzavretú a mimo dosahu detí!

Veľkosť balenia: 10 ml fľaštička s aplikátorom. 1 rozprašovacia dávka = 0,1 ml.
Doba použiteľnosti: pozri dátum expirácie uvedený na obale. Nepoužívajte dlhšie ako 8 týždňov po prvom otvorení.
Pokyny na skladovanie: Uchovávejte pri teplote 8 °C až 25 °C. Chráňte pred svetlom.

 Výrobca: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, 1200 Viedeň, Rakúsko
Distribútor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viedeň, Rakúsko
Distribútor v Slovenskej republike: Agency MM Health SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá



Stav informácií: september 2021

Použité symboly:

 Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!  Výrobca  Šarža
 Spotrebujte pred  8 °C až 25 °C Uchovávejte pri teplote 8 °C až 25 °C.  Chráňte pred svetlom.



NAVODILO ZA UPORABO

CERUSTOP® olje za uho v pršilu
Medicinski pripomoček

Kaj je CERUSTOP olje za uho v pršilu?

CERUSTOP olje za uho v pršilu se uporablja za odstranjevanje čezmernega ali zasušenega ušesnega masla (cerumna) in preprečevanje vnetja zunanjega sluhovoda.

Kaj vsebuje CERUSTOP olje za uho v pršilu?

Kaprilni/kaprilnski trigliceridi, tekoči parafin, izostearilni izostearat, mandljevo olje, PEG-40-sorbitan peroleat, BHK/BHT in vitamin E.

Kako deluje CERUSTOP olje za uho v pršilu?

Zasušeno ušesno maslo vpliva na sluh in lahko povzroči vnetje zunanjega sluhovoda. Zato ga je treba redno odstranjevati.
CERUSTOP olje za uho v pršilu se razprši v zunanji sluhovod. Prodre v ušesno maslo in ga raztopi, da se lažje odstrani.
CERUSTOP olje za uho v pršilu je posebej primerno tudi za uporabnike slušnih aparatov.
CERUSTOP olje za uho v pršilu lahko uporablja tudi zdravnik pred spiranjem ušes.

Indikacije – Kdaj uporabiti CERUSTOP olje za uho v pršilu?

- za raztapljanje in odstranjevanje čezmernega ali zasušenega ušesnega masla, za preprečevanje vnetja zunanjega sluhovoda;
- za čiščenje uhljev in zunanjega sluhovoda.

CERUSTOP olje za uho v pršilu se lahko uporablja brez omejitev v obdobju nosečnosti in dojenja.
CERUSTOP olje za uho v pršilu je primerno za odrasle in otroke od 3. leta starosti naprej.

Odmerjanje in način uporabe – Kako uporabljati CERUSTOP olje za uho v pršilu?

Za odstranitev čezmernega ali zasušenega ušesnega masla vam priporočamo, da razpršite mlačno CERUSTOP olje za uho v zunanji sluhovod 2-krat do 3-krat (odrasli) oziroma od 1-krat do 2-krat (otroci) na dan.
Zamašite uho s koščkom vate, da preprečite iztekanje olja. Vato nežno vstavite v uho, nikoli je na silo ne potiskajte v sluhovod! Po 10 minutah previdno sperite uho s toplo vodo, po možnosti z uporabo nastavka za tuš.
Če je ušesno maslo izjemno trdo, postopek ponovite.
Za odstranitev ušesnega masla, nečistoč in odmrlih celic kože z zunanjega ušesa nekajkrat razpršite mlačno CERUSTOP olje za uho v pršilu na košček vate in večkrat zbrišite uho. Nato ga očistite s suho krpico.
Priporočamo vam, da po spiranju z vodo uporabite NORMISON kapljice za uho, ki hitro posušijo zunanji sluhovod in obnovijo naravni kislini plašč kože.

Kdaj ne smete uporabljati CERUSTOP olja za uho v pršilu?

- če ste preobčutljivi (alergični) na katerokoli sestavino CERUSTOP olja za uho v pršilu,
- če imate vnet sluhovod ali počen bobnič (luknjo v bobniču).

Možni neželeni učinki/interakcije

Neželeni učinki niso znani.
Raziskave o medsebojnem delovanju z drugimi izdelki niso bile izvedene.

Navodila za varno uporabo

CERUSTOP olje za uho v pršilu je medicinski pripomoček. Če imate bolečine v ušesu ali izjemno trde čepce ušesnega masla, se posvetujte z zdravnikom.
V primeru, da imate bolečine v bobniču ali je vaše srednje uho poškodovano, se pred uporabo medicinskega pripomočka CERUSTOP olje za uho v pršilu, posvetujte s svojim zdravnikom.
Ne vstavljajte predmetov v sluhovod (npr. bombažnih palčk).

Steklenička mora biti vedno dobro zaprta. Shranjujte nedosegljivo otrokom!

Velikost pakiranja: Steklenička s pršilom vsebuje 10 ml olja. 1 razpršek = 0,1 ml.
Rok uporabnosti: Glejte datum, naveden na embalaži. Ne uporabljajte dlje kot 8 tednov po prvi uporabi.
Pogoji shranjevanja:  8 °C až 25 °C Shranjujte pri temperaturi od 8 °C do 25 °C.  Hranite stran od sončne svetlobe!

 **Proizvajalec:** MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystrasse 129, 1200 Dunaj, Avstrija
Pooblaščen predstavnik za trženje v Sloveniji: OPH Oktal Pharma, Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče



Datum revizije: september 2021

Pomen simbolov na ovojniní:

 Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo  Proizvajalec  Številka serije
 Rok uporabnosti  8 °C až 25 °C Shranjujte pri temperaturi od 8 °C do 25 °C.  Hranite stran od sončne svetlobe!