



PUTTY BUDDIES®

VISOKO KAKOVOSTNI MEHKI ČEPKI ZA UŠESA IZ SILIKONA

(če so čepki za ušesa priloženi pakiranju)

Navodila za uporabo

- Čepke naj vstavi odrasla oseba, nikoli otrok.
 - Čepke oblikujte v kroglico in jo sploščite s prsti. Oblikujte, da pokrije zunanji del ušesa in se udobno prilega.
 - Čepke odstranite s pritiskom za ušesom.
 - Čepki so za večkratno uporabo. Odvrzite jih 2 tedna po prvi uporabi (največ 5 uporab), če razpokajo, razpadejo ali se umažejo.
 - NE trgajte čepkov ali jih silite v ušesni kanal. Glejte sliko.
 - NE uporabljajte s plavalno kapo.
 - NE uporabljajte med spanjem ali za zaščito pred hrupom.
 - NE dovolite stika z lasmi, losjoni, sončnimi kremami ali kemikalijami. Čepke vedno nameščajte in odstranjujte s čistimi in suhimi rokami.
- (Za podrobnejše informacije si oglejte navodila v embalaži.)



**PRIPOROČENA
UPORABA**



**NE VSTAVLJATE V
UŠESNI KANAL**

Za zamenjavo ušesnih čepkov obiščite **www.EarVolution.com**.

Mehke silikonske čepke za ušesa Putty Buddies® je zasnoval izkušen otorinolaringolog z več kot 40 leti izkušenj in ga zdravniki po svetu priporočajo za plavanje, prhanje in splošno zaščito pred vodo.

OPOZORILA: Potreben je nadzor odrasle osebe. Ni priporočljivo za potapljanje na globini nad 3 metre. Ni priporočljivo uporabljati s plavalno kapo. Ni priporočljivo za zaščito pred hrupom ali spanje. Izogibajte se stiku z lasmi, losjoni, sončnimi kremami ali kemikalijami. Nameščajte in odstranjujte s čistimi in suhimi rokami. Čepki za ušesa se nosijo SAMO v času, ko ste v vodi. Čepke shranjujte v nadzorovani sobni temperaturi, ko jih ne

uporabljate. Za največjo zaščito čepke uporabljajte skupaj z Ear Band-It® ali Ear Band-It® Ultra naglavnim plavalnim trakom.

PREVODNO: Prekrijte le odprtino ušesa. NE VSTAVLJAJTE V UŠESNI KANAL. Silikonski čepki so varni, če upoštevate navodila. Če potisnete čep v ušesni kanal, ga NE skušajte sami odstraniti. Ne uporabljajte pincete, vatiranih palčk ali drugih pripomočkov, saj lahko čep potisnete še globlje v kanal. Čimprej poiščite pomoč zdravnika, ki ima ustrezne instrumente in znanje za varno odstranjevanje čepkov. Če je čep v ušesnem kanalu krajši čas, ne bo povzročil škode, če ga ne boste poskušali sami odstraniti in ga nehote potisnili globlje v odprtino. Uporabljajte samo kot je navedeno v navodilih.

POMEMBNO: Učinkovitost je največja, kadar se čepki in trak Ear Band-It® uporabljajo skupaj. Ni primerno za skakanje na glavo v vodo.

OPOZORILO:

NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli.

Uporabljajte se pod nadzorom odraslih.

Hranite izven dosega otrok, mlajših od 3 let.

