

1. L



2. R



3. R



4. R



5. R



Actimove® otroška stabilizacijska opornica za zapestje

Odstranljiva kovinska ploščica. Primerna za levo in desno roko.

Navodilo za uporabo

Uvod: Hvala ker ste izbrali Actimove® stabilizacijsko opornico za zapestje z odstranljivo kovinsko ploščico, za levo in desno roko.

Opis proizvoda: Actimove® Otroška stabilizacijska opornica za zapestje je zasnovana za lajšanje bolečin v zapestju in zdravljenje, ki sta podprta z anatomsko oblikovano odstranljivo kovinsko ploščico in uravnoteženo toploto ter medicinsko kompresijo. Material, ki ne vsebuje neoprena, nudi udobje in dobro zračnost.

Predvidena uporaba: Izdelek je namenjen zagotavljanju podpore zapestju. Področja uporabe vključujejo:

- tendovaginitis,
- zvini in nategi,
- poškodbe mehkih tkiv,
- osteoartritis,
- revmatoidni artritis,
- pooperativna oskrba,
- oskrba po odstranitvi mavca.

Če niste prepričani, ali je izdelek primeren za vas, se obrnite na svojega zdravnika.

Navodila za uporabo: Izdelek je namenjen za domačo uporabo ali v primeru preprečevanja poškodb med aktivnostjo (npr. pri športu). Čas nošenja se giblje med eno uro (pri nošenju med vadbo) in dolgotrajno vsakodnevno uporabo v primeru kroničnih stanj. Lahko se uporablja na levi ali desni roki.

Uporaba: Za uporabo na levem zapestju - kovinsko ploščico vstavite v spodnji žep opornice, da stabilizirate dlan in zapestje (slika 1).

Za uporabo na desnem zapestju - kovinsko ploščico vstavite v zgornji žep opornice, da stabilizirate dlan in zapestje (slika 2).

Obvestilo: O vsakem resnem incidentu, ki se je zgodil v zvezi s tem medicinskim pripomočkom, je treba poročati družbi BSN medical GmbH in pristojnemu organu v vaši državi.



Medicinski pripomoček



Glejte navodila za uporabo



Hranite na suhem



Hranite stran od sončne svetlobe



Ne vsebuje naravne gume (lateksa).



Ročno pranje pri 40°C



Beljenje ni dovoljeno



Ožeti, položiti na ravno podlago in sušiti



Likanje ni dovoljeno.



Kemično čiščenje prepovedano.



Proizvedeno za: BSN medical GmbH, Schützenstrasse 1-3, 22761 Hamburg, Nemčija.

Zasnovano v Nemčiji. Proizvedeno na Kitajskem.

Distributer: Sanolabor d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

JBR12590.04 09/2022