

INFORMACIJE ZA KUPCA

FFP3 NR OBRAZNA RESPIRATORSKA ZAŠČITNA MASKA BREZ VENTILA NOVUM NV 2112, bela, za enkratno uporabo
NAVODILA
Izdelek je skladen s: EN149:2001+A1:2009 Uredbo (EU) 2016/425 o osebno varovalni opremi
Omejitev uporabe
Izdelek se uporablja samo za zaščito uporabnika pred trdnimi snovmi in tekočimi aerosoli. - ne uporabljajte proti hlapnim aerosolom. - izbira uporabe temelji na stopnji zaščite izdelka.
Pred uporabo preverite
- Zaščitno masko izberite glede na to v kakšnem okolju jo uporabljate. - Natančno upoštevajte navodila za uporabo.
Pravilno nošenje maske
- Pravilno izbrano masko nosite, kot je prikazano na slikah 1-2-3-4. - Tesnost maske preverite, kot je prikazano na sliki 3. - Da bi imela maska kar največjo učinkovitost, uporabnik ne bi smel imeti brade, brkov in brazgotine na obrazu in glavi. V takih primerih bo maska puščala.

Uporaba
- Pred vstopom v delovni prostor še enkrat preglejte masko. Kot na sliki 3, vdihnite in preizkusite tesnost. Če pride do puščanja, si masko ponovno namestite, kot je prikazano na slikah 1-2-3-4. - Na območju dela mora biti prisotno vsaj 19,5% kisika. V nasprotnem primeru maske ni mogoče uporabiti. - Maske ne uporabljajte na mestih, kot so neprodušne cisterne, brezračni vodnjaki, skladišča in okolja z neznanimi polutanti. - Maske ne zagotavljajo zaščite pred plinom in paro. - Takoj zamenjajte masko, če pride do občutne dihalne odpornosti v delovnem okolju.

- Eno masko uporabite samo v eni delovni izmeni. - Ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah.
Vzdrževanje
- Maske ne popravljajte, niti ne menjajte njenih delov. - Če je maska poškodovana, jo takoj zamenjajte. - Maske ne uporabljajte, če ji je pretekel rok uporabe, če pride do dihalne upornosti, ali če je ta poškodovana. - Masko med uporabo zaščitite pred prahom in umazanijo.
Opomba
- Uporabite samo filtre označene z NR, pri delu v eni izmeni.
Shranjevanje
- Maske shranjujte po navodilih proizvajalca. - Temperatura skladiščenja naj bo med -20 °C in +40 °C. - Vlažnost v skladišču je lahko največ 80%.

Ime, naslov in identifikacijska številka priglašene organa:
 Universal Sertifikasyon Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
 Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul /TURKEY
 Umraniye-Istanbul /TURKEY


Identifikacijska številka:2163

Izjavo o skladnosti najdete na: <https://www.sanolabor.si/artikel/maska-respirator-ffp3-1>

LOT: 12112020003

Datum izdelave: 12/11/2020

Rok uporabnosti: 12/11/2023

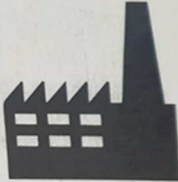

NOVUM MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 Mimar Sinan Mahallesi Abacı Sokak No:13 Kat:4
 Çekmeköy/ İSTANBUL / TURKEY+90 216 640 55 56 /+90 538 865 6229
 sales@novummedikal.com www.novummedikal.com

Uvoznik: Sanolabor, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija