

LAHEK ROLATOR GIGO 2G

REF 735 100 200

Navodila za uporabo

Predgovor

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Drive DeVilbiss.

Ne boste razočarani nad dizajnom, funkcionalnostjo in kakovostjo tega izdelka.

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila. Vsebujejo pomembne varnostne informacije in dragocene nasvete za pravilno uporabo in nego. Če imate vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na prodajalca.

Ta navodila za uporabo vsebujejo vse pomembne podatke in informacije za nastavitve in delovanje. Najbolj aktualna Navodila za uporabo so na voljo v obliki PDF na spletu ali pa jih lahko zahtevate od prodajalca.

Slabovidni si jih lahko prikažejo v večjem formatu. Slephe bolnike mora poučiti njihov spremljevalec. Popravila in nekatere prilagoditve zahtevajo posebno tehnično usposabljanje in ga mora zato opraviti prodajalec medicinskega pripomočka.

Izjava o skladnosti

Za opisani izdelek DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG izdaja izjavo o skladnosti za medicinski pripomoček glede na uredbo (EU) 2017/745.

Življenjska doba

Naše podjetje za ta izdelek predvideva petletno življenjsko dobo, če se izdelek uporablja po navodilih in upoštevane vse zahteve glede vzdrževanja in servisiranja.

Ta življenjska doba se lahko znatno preseže, če z izdelkom skrbno ravnate, ga popravljate, vzdržujete in uporabljate. Prav tako se lahko bistveno skrajša življenjska doba z ekstremno in nepravilno uporabo.

Odstranjevanje

Če izdelka ne potrebujete več, se obrnite na svojega posrednika ali pa izdelek odnesite na lokalni center za odpadke.

Identifikacijska tablica



1 Številka izdelka | 2 Ime izdelka | 3 Proizvajalec | 4 Serijska številka | 5 UDI koda | 6 Maksimalna obremenitev | 7 Sledite navodilom za uporabo | 8 Medicinski pripomoček | 9 Datum proizvodnje (leto-mesec)

Ponovna uporaba

Ta izdelek je mogoče ponovno uporabiti.

Upoštevajte, da mora vsak novi uporabnik dobiti vse tehnične dokumente, ki so potrebni za varno uporabo in ravnanje s pripomočkom.

Izdelek mora biti pregledan s strani specializiranega prodajalca, očiščen in v optimalnem stanju.

Med uporabo vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila.

Dodatki so na voljo pri specializiranem prodajalcu ali na www.drivedevilbiss.de.

Garancija

Garancijski rok za izdelek je 24 mesecev od datuma nakupa. Poškodovani deli bodo zamenjani brezplačno, če je mogoče dokazati, da obstaja napaka v materialu ali izdelavi.

Deli, ki so izpostavljeni obrabi, niso predmet garancije, razen če potrebujejo popravilo ali zamenjavo zaradi proizvodne napake ali napake v materialu.

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb na osnova tehničnih izboljšav in sprememb v oblikovanju.

IZKLJUČITEV GARANCIJE

Deli, ki so izpostavljeni obrabi, med drugim vključujejo: kolesa, zavore in ročaji.

Deli izdelka



1. Zavora	6. Pladenj	11. Zadnje kolo
2. Ročaj	7. Sedež	12. Nosilec za palico
3. Potisni ročaj	8. Okvir	13. Zvezdasti vijak za
4. Zavorna žica	9. Košara	pritrnitev
5. Hrbtni naslon	10. Prednje kolo	

Indikacije

INDIKACIJE:

Pripomoček za hojo za zunanjo in notranjo uporabo. Oseba je dobila pripomoček za hojo z namenom nadomestiti ali izboljšati omejeno sposobnost hoje (razširitev radiusa aktivnosti ali gibljivosti). Osebe z omejeno funkcijo rok potrebujejo posebne prilagoditve (izvedbe ročajev ali naslonov za roke). Premični pripomočki za hojo morda niso primerni za osebe z motnjami ravnotežja; v posameznih primerih je to potrebno testirati. Kadar je potrebno, mora biti prisoten spremljevalec. Rolator se uporablja samo za običajne, vsakodnevne dejavnosti.

KONTRAINDIKACIJE:

Rolator ni primeren za uporabo v primeru: prisotnih motenj zaznavanja, hude izgube ravnotežja, nezmožnosti posedanja.

Obseg dobave

1x	rolator
1x	košara
1x	pladenj
1x	nosilec za palico
1x	hrbten naslon
1x	navodila za uporabo

Varnostna navodila

- Rolator uporabljajte le kot pripomoček za hojo.
- Rolator uporabljajte le na ravni in trdi površini.
- Rolatorja ni dovoljeno uporabljati kot sedež v vozilih (npr. na avtobusu ali vlaku)!
- Prepovedano je stati na rolatorju in na njem prevažati osebe ali živali.
- Upoštevajte največjo dovoljeno težo uporabnika. To informacijo lahko najdete med tehničnimi podatki v teh navodilih za uporabo, kakor tudi na identifikacijski tablici.
- Pladenj uporabljajte samo za majhne, lahke predmete, ki niso ostri ali vroči. Največja dovoljena obremenitev: 5 kg.
- Košaro uporabljajte samo za prevoz predmetov in je ne preobremenite: največja dovoljena obremenitev: 5 kg.
- Uporaba rolatorja na tekočih stopnicah je izrecno prepovedana!
- Potisni ročaji morajo vedno biti nastavljeni vzporedno s smerjo gibanja – nevarnost prevrnitve!
- Ne obešajte vrečk na ročaje – nevarnost prevrnitve!
- Na strmih površinah uporabljajte zavoro (povlecite zavorno ročico navzgor).
- Prekomerno naslanjanje na ročaje lahko povzroči, da se rolator prekucne nazaj.
- Med zlaganjem in odpiranjem rolatorja si lahko priščipnete oblačila ali telesne dele.
- Rolator zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Deli lahko postanejo vroči in ob dotiku povzročijo poškodbo kože.

- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je rolator brezhiben in da so vsi nastavljivi deli pravilno pritrjeni. Preverite, da zavore pravilno delujejo!
- Pred uporabo se prepričajte, da je zložljivi del pravilno zaklenjen.
- Redno preverjajte vijake in jih privijte, če je potrebno.
- Zaviranje ima lahko učinek na obrabo pnevmatik. Iz tega razloga redno preverjajte učinek zaviranja in stanje pnevmatik.
- Rolatorja NE smete prenašati tako, da ga držite za sedež, snemljive dele ali zavorno žico.

Odpiranje rolatorja



Postavite rolator na kolesa. Potisnite prednji del okvira naprej tako, da ročaje potisnete navzdol in nazaj dokler rolator ne stoji na vseh kolesih. Nato potisni sedež navzdol, da se mehanizem zaklene (slika 1).

Montaža dodatkov



Obesite košaro na kljukici spredaj pod sedežem in pladenj postavite na sedež tako, da njegove »nogice« vstavite v za to pripravljena mesta (slika 2).

Hrbtni naslon vstavite v nameščeno cev in ga fiksirajte s klipi, kot je prikazano (slika 3).

Nastavitev višine potisnih ročajev


Vstavite potisne ročaje v cev najmanj do prve ujemajoče luknje. Vstavite pritrdilni vijak z notranje strani, namestite podložko in privijte zvezdasti vijak (slika 4).

Če želite spremeniti višino potisnih ročajev, popustite pritrdilni vijak tako, da zavrtite zvezdasti vijak v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato nastavite ročaj na želeni višini tako, kot je opisano zgoraj (slika 5).



Nastavitev zavor

Če je zaviranje slabo ali premočno, lahko zavoro nastavite bodisi pri zavorni ročici (slika 6) ali z uporabo nastavitvenega vijaka na zavorni žici spodaj (slika 7), da dosežete želeni učinek zaviranja.

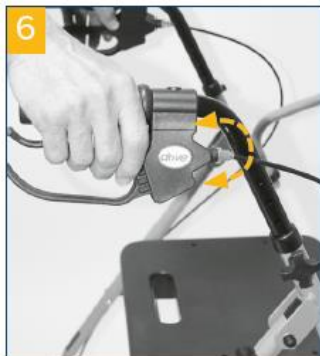


Zavora je pravilno nastavljena takrat, ko sta v stanju neaktivirane zavore zavorna ročica in zavorna žica prosti in se kolesa vrtijo prosto brez brušenja.

Zaviranje/Parkiranje

Za zaviranje med hojo z rolatorjem z rokami povlecite obe zavorni ročici navzgor (slika 8). Vedno zavirajte počasi z obema rokama z enako močjo.

Za parkiranje rolatorja potisnite obe zavorni ročici navzdol, dokler se slišno ne zaskočita (slika 9). Če želite sprostiti zavoro, povlecite obe zavorni ročici navzgor, dokler se ne sprostita (zavorni ročici sta v srednjem položaju).

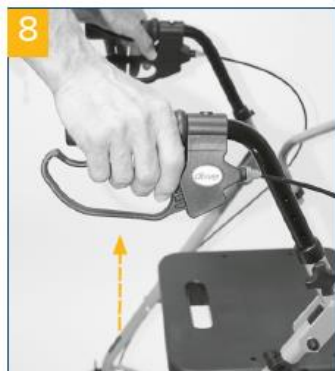

Zaviranje lahko povzroči obrabo pnevmatike. Iz tega razloga redno preverjajte zaviralni učinek.

Sedenje



Postavite rolator na ravna in trdna tla. Aktivirajte zavoro. Rolator mora biti stabilen in ne sme drseti. Sedite pokončno in ne nagibajte se nazaj (slika 10).

Dovoljen je samo sedežni položaj, ki je prikazan – v nasprotni smeri gibanja (stran 11).

Zlaganje/transport/odlaganje

Če želite rolator zložiti, povlecite ročico za zlaganje proti sebi in z roko povlecite sedež navzgor (sliki 12-13).

Po potrebi odstranite dodatke!



Čiščenje/vzdrževanje

- Redno čistite z vlažno krpo!
- Ne uporabljajte agresivnih čistil!
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil!
- Ne uporabljajte nobenih čistil na osnovi klora in kisa!
- Za razkuževanje lahko uporabljate razkužilo v obliki razpršila kot sta npr. Descosept AF ali Bacillol AF.
- Redno preverjajte vijake in jih po potrebi privijte.
- Izdelek ne sme biti dlje časa izpostavljen temperaturam nad 60 °C (npr. uporaba v savni ipd.)!
- V primeru napak se obrnite na svojega prodajalca!
- Redno preverjajte stanje pnevmatik. Pnevmatike so »polne«, kar pomeni, da ni potrebno preverjati tlaka ali jih polniti z zrakom. Vedno preverite pnevmatike za morebitne razpoke ali druge poškodbe.

Tehnični podatki

Izdelek	GIGO 2G
Številka izdelka	735100200
Celotna dolžina x Celotna širina	61 cm x 61,5 cm
Višina ročaja	87 cm – 96 cm
Širina sedeža x globina sedeža	34 cm x 33,5 cm
Višina sedeža	54 cm
Širina med ročaji	40,5 cm
Dimenzija zloženega rolatorja	28 x 61,5 x 100 cm
Celotna teža	6 kg
Maksimalna obremenitev	120 kg
Material okvirja	Aluminijasta cev